

# Animal TB Rapid Tuberculosis Test 中文使用說明書

## 內容物介紹

提供的材料：滴管 + 測試盤 (單獨密封鋁箔袋裝) x 10  
稀釋緩衝液(Diluent) 1瓶



## 採樣和樣品準備


- 血清或血漿樣本，可冷藏保存於2°C - 8 °C的冰箱，48 小時內使用。
- 全血在使用或儲存之前，必須將全血中的血球與血清分離（例如透過離心）。
- 為了延長儲存時間，請將樣品保持在 -20 °C。避免重複冷凍和解凍樣本。
- 樣品出現混濁的情況，在檢測前必須先靜止沉澱。
- 脂血、溶血或細菌污染的樣本可能導致假陽性或假陰性結果。

## 步驟

測試程序時間 20 分鐘

1. 取出測試盤並將其放在乾淨、平坦的表面上。
2. 使用定量吸管（試劑中提供）將 1 滴樣品(血清、血漿)滴入測試盤上的樣品 (S) 孔中。或是也可以使用微量定量吸管滴入 40  $\mu$ L 樣品。（圖1）
3. 立即加入 3 滴提供的  稀釋緩衝液 (Diluent)。（圖2）
4. 開始計時，20分鐘後讀取結果。


強陽性在 5 分鐘內會在測試區「T」產生一條或多條線。  
所有結果必須在25 分鐘內判讀。

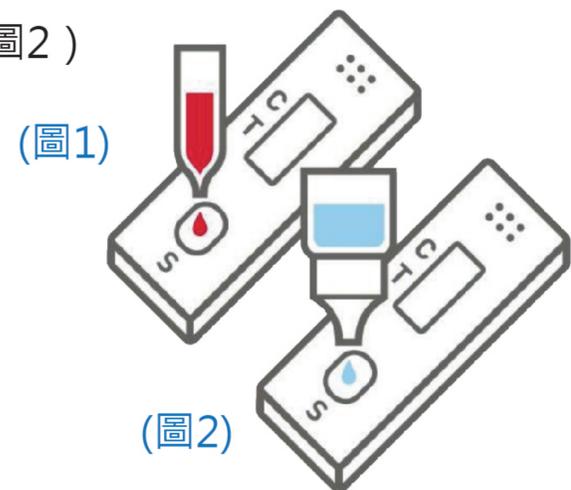

## 結果判讀



對於結果判讀，請參照隨附的圖案，該圖案顯示測試線 (T) 和控制線 (C) 的位置

動物結核病快速檢測  
測試線判讀圖案：(如右圖所示)

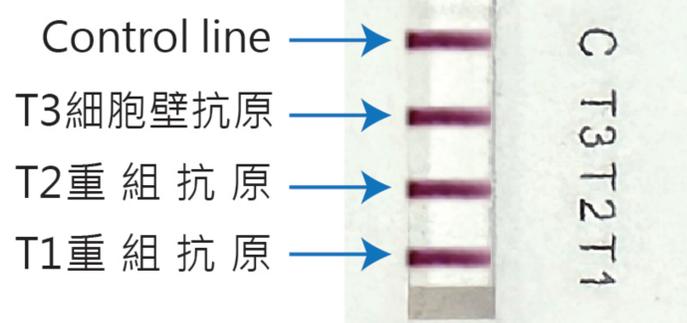

測試線 (T) 可能顯得清晰、弱陽性或強陽性。 如果沒有出現對照線 (C)，請重複測試！

## 結果判讀

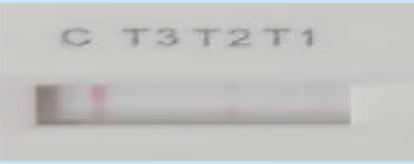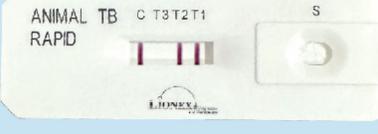陰性	結果 1	控制區「C」出現一條明顯的線， 「T」區無測試線。	
	結果 2	僅測試線 2「T2」 出現一條非常微弱的測試線。	
在「T2」處出現“非常微弱”的線，但「T3」或「T1」處沒有線出現			
陽性	結果 1	最多出現 4 條粉紫色線	
	結果 2	一條出現在控制區「C」， 其他出現在測試區「T」。	
	結果 3	如果出現一條或多條測試線， 則無論測試線的位置為何「測試線 T 1」、 「測試線 T 2」、「測試線 T 3」， 結果均為陽性。	     
陽性：「T」出現 1-3 條測試線（樣本含有針對其中一種抗原的抗體）。			

## 保存方式

請儲放於 2~30°C 陰涼乾燥處



供應商：



德國原裝進口

代理商：



訂貨專線  
0800-881689

**鈺民有限公司**  
BIOANCOS ENTERPRISE CO., LTD.  
台中市南區福中街11號1樓  
TEL: 04-22601689 FAX: 04-22601105  
E-mail: johnnyps@ms35.hinet.net  
Web: www.bioancos.com